

5 Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt sind allgemeine Fehlermeldungen sowie Fehlermeldungen, die bei der Änderung von Einstellungen angezeigt werden können beschrieben. Weitere Fehlermeldungen, die während einer Messung angezeigt werden können, sind in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Messverfahrens (z.B. Oldenburger Satztest) beschrieben.

Je nach Konfiguration und verwendeten Geräten bzw. verwendeter Audiometriesoftware sind einige der beschriebenen Fehlermeldungen nicht zutreffend und treten im Betrieb nicht auf.

Je nach Konfiguration werden die Fehlermeldungen gegebenenfalls nicht direkt angezeigt sondern nur im Fehlerprotokoll ausgegeben.

5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

5.1.1 Fehler beim Starten einer Messung

In diesem Abschnitt sind die Fehlermeldungen beschrieben, die beim Start einer Messung oder beim Aufruf zur Änderung der Einstellungen der „Oldenburger Messprogramme“ angezeigt werden können.

5.1.1.1 Die Systemklänge des Betriebssystems (Soundschema) sind aktiviert. Die Systemklänge müssen unbedingt deaktiviert werden. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls die Systemklänge in der Systemsteuerung nicht deaktiviert sind. Hinweise zur Deaktivierung der Systemklänge finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

5.1.1.2 Es ist kein Treiber für die Audioausgabe ausgewählt. Bitte korrigieren Sie die Soundkarteneinstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls in den Einstellungen für die Audioausgabe kein Treiber ausgewählt ist. Rufen Sie den entsprechenden Einstellungsdialog auf, um die Einstellung zu korrigieren (siehe Abschnitt 4.3).

5.1.1.3 Der für die Audioausgabe ausgewählte Treiber kann nicht gefunden werden NAME

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls der den Einstellungen für die Audioausgabe ausgewählte Treiber nicht gefunden werden (statt NAME wird der Name des entsprechenden Treibers angezeigt). Rufen Sie den Einstellungsdialog auf, um die Einstellung zu korrigieren (siehe Abschnitt 4.3). Sollte dies nicht möglich sein wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.4 In den Audiometer-Einstellungen ist eine Audioquelle ungültig. Bitte korrigieren Sie die Einstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls in den Einstellungen des Audiometers für die Audioausgabe mindestens eine Audioquelle ungültig ist. Rufen Sie den Einstellungsdialog auf, um die Einstellungen zu korrigieren (siehe Abschnitt 4.4)

5.1.1.5 In den Audiometer-Einstellungen ist der Kopfhörer ungültig. Bitte korrigieren Sie die Einstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls die Einstellungen des Audiometers für den Kopfhörer ungültig sind. Rufen Sie den Einstellungsdialog auf, um die Einstellungen zu korrigieren (siehe Abschnitt 4.4)

5.1.1.6 In den Audiometer-Einstellungen ist ein Lautsprecher ungültig. Bitte korrigieren Sie die Einstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls die Einstellungen des Audiometers für mindestens einen Lautsprecher ungültig sind. Rufen Sie den Einstellungsdialog auf, um die Einstellungen zu korrigieren (siehe Abschnitt [4.4](#))

5.1.1.7 In den Audiometer Einstellungen ist ein Abschwächer-Kanal ungültig. Bitte korrigieren Sie die Einstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls in den Einstellungen des Audiometers mindestens ein Abschwächer-Kanal ungültig ist (nicht für alle Audiometer vorhanden). Rufen Sie den Einstellungsdialog auf, um die Einstellungen zu korrigieren (siehe Abschnitt [4.4](#))

5.1.1.8 Nicht alle Parameter für den Start der Oldenburger Messprogramme sind vorhanden. Eventuell muss zuerst die Software des Audiometer-Herstellers konfiguriert werden.

Dieser Fehler wird angezeigt, falls beim Starten der Software nicht alle Argumente des Hardware-Herstellers vorhanden sind. In diesem Fall ist die Software entweder für diesen Hardware-Hersteller nicht geeignet für einen Aufruf ohne Argumente, oder es muss zuerst die Software des Hardware-Herstellers einmalig aufgerufen werden, um globale Einstellungen zu setzen.

5.1.1.9 Es wurden zu viele Instanzen dieser Anwendung gestartet.

Dieser Fehler wird angezeigt, falls die Software mehrfach gestartet wird. In diesem Fall muss zuerst jede vorher gestartete Instanz der Software beendet werden. Falls diese nicht sichtbar ist, muss ggf. im Windows Task-Manager der dazugehörige Prozess HtShellLoader.exe beendet werden.

5.1.1.10 Interner Fehler (-1). Eine mögliche Ursache ist eine Änderung des Systems, z.B. das Entfernen einer Soundkarte oder ein Datenbankfehler, z.B. ungenügende Zugriffsrechte oder defekte Sperrdateien. Informationen darüber finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder der FAQ.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls ein nicht näher spezifizierter Fehler beim Start der Anwendung oder einer Messung aufgetreten ist. Ursache kann z. B. sein, wenn bereits konfigurierte Geräte aus dem System entfernt wurden (z. B. die verwendete Soundkarte wurde ausgebaut). Lesen Sie hierzu auch Abschnitt [3.2.3](#) und wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.11 Erforderliche Lizenz nicht vorhanden.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls keine gültige Lizenz vorhanden ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.12 Die Borland Database Engine (BDE) wurde nicht auf Ihrem System gefunden. Verständigen Sie bitte Ihren Kundendienst.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn keine Installation der erforderlichen Datenbank-Treiber vorhanden ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.13 Der angeforderte Datensatz wurde nicht in der Datenbank gefunden, er ist jedoch in der lokalen Tabelle vorhanden. Transferieren Sie gegebenenfalls den Datensatz in die aktuelle Datenbank.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der angeforderte Datensatz nicht in der aktiven Netzwerk-Datenbank vorhanden ist, aber in der lokalen Datenbank gefunden wurde. In diesem Fall wurde der Datensatz wahrscheinlich bei einem Zugriffsfehler auf die Netzwerk-Datenbank automatisch in der lokalen

Datenbank anstelle der Netzwerk-Datenbank gespeichert. Das Transferieren von Datensätzen von der lokalen Datenbank in die Netzwerk-Datenbank ist im Abschnitt „Einstellungen Datenbank“ beschrieben. Falls dabei Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.14 ... Shell ungültig

Dieser Fehler wird angezeigt, falls beim Startvorgang der Software ein interner Fehler auftritt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.15INI Datei oder StartupCommand nicht verfügbar

Dieser Fehler wird angezeigt, falls beim Startvorgang der Software ein interner Fehler aufgrund einer fehlenden Datei oder fehlender Einträge darin auftritt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.16 Interner Fehler (-3). ...

Andere derartige Fehlermeldungen werden angezeigt, falls ein interner Fehler beim Start der Messung aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.17 MOLM140 startup error -1

Siehe [5.1.1.10](#)

5.1.1.18 MOLM140 startup error -999

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls keine gültige Lizenz vorhanden ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.19 MOLM140 startup error ...

Andere derartige Fehlermeldungen werden angezeigt, falls ein interner Fehler beim Start der Messung aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.1.20 Die zur Ausführung des Programms notwendigen Schreibrechte in folgendem Verzeichnis sind nicht vorhanden (überprüfen Sie auch alle anderen Verzeichnisse auf Schreibrechte): ...

Diese Fehlermeldung gefolgt vom entspr. Verzeichnisname wird angezeigt, falls in einem oder mehreren Verzeichnissen auf dem Computer die für die Ausführung der Oldenburger Messprogramme notwendigen Schreibrechte fehlen. Beenden Sie die Anwendung und ändern Sie bzw. lassen Sie die Schreibrechte entsprechend ändern.

5.1.1.21 Sie sind momentan nicht mit Administratorrechten am System angemeldet. Dies ist für eine weitere fehlerfreie Ausführung gegebenenfalls erforderlich. Möchten Sie dennoch fortfahren?

Dieser Fehler wird angezeigt, falls der aktuelle Benutzer beim Starten der Software keine Administratorrechte besitzt. Dieser Fehler kann im angezeigten Dialog ignoriert werden, ggf. treten jedoch Folgefehler auf, die zur Beendigung der Software führen. Daher sollte dies nicht ignoriert werden, sondern die Abgebrochen und der Vorgang mit vorhandenen Administratorrechten wiederholt werden. Diese Prüfung wird nur vor Aktionen durchgeführt, für die Administratorrechte erforderlich sind (z.B. Installation eines Treibers).

5.1.2 Fatale Fehler während einer Messung

In diesem Abschnitt sind die Fehlermeldungen beschrieben, die während einer Messung angezeigt werden können. Diese Fehler sollten im regulären Betrieb nicht auftreten, anderenfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.1 Es ist ein fataler Fehler im Modul error aufgetreten. Bitte beenden Sie unverzüglich die Anwendung und stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Geräte gefährdet sind.

Beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.2 A fatal error occurred. Either shell is invalid or recurrent call of function 'WediMessage'

Beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.3 Im Signalausgabemodul ist ein Fehler aufgetreten, die Ausgabe wurde gestoppt. Bitte beenden Sie die Anwendung sofort und stellen Sie sicher, daß alle Personen und Geräte sicher sind.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls während der Messung ein fataler Fehler in der Signalausgabe aufgetreten ist. Beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.4 Die Geräte-Einstellungen stimmen nicht mit dem angeschlossenen Gerät überein. Bitte korrigieren Sie die Einstellungen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls während der Verwendung des Geräts festgestellt wird, dass die in der Software eingestellten Geräte-Einstellung von den tatsächlichen Einstellungen des Geräts abweichen. Korrigieren Sie die Geräte-Einstellungen in der Software. Falls dies nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.5 Die Einstellungen stimmen nicht mit dem angeschlossenen Gerät überein und wurden korrigiert. Bitte versuchen Sie den Vorgang erneut.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls während der Verwendung des Geräts festgestellt wird, dass die in der Software eingestellten Geräte-Einstellung von den tatsächlichen Einstellungen des Geräts abweichen und diese automatisch angeglichen wurden. Falls der Fehler bei einem erneuten Versuch wieder auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.1.2.6 Es ist ein Zugriffs-Fehler mit der Datenbank aufgetreten (z.B. wegen Netzwerk-Problemen oder ungenügenden Zugriffs-Rechten). Daher wurde die lokale Datenbank aktiviert und der Datensatz dort gespeichert. Stellen Sie die Integrität der Datenbank wieder her, z.B. indem Sie den Datensatz von der lokalen Datenbank in die Netzwerk-Datenbank transferieren. Sollten dabei Probleme auftreten, verständigen Sie bitte Ihren Kundendienst.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn eine Netzwerk-Datenbank verwendet wird und beim Zugriff darauf ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall wird automatisch auf die lokale Datenbank umgeschaltet. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2 Fehlermeldungen bei Änderungen an den Einstellungen

5.2.1 Fehler bei der Autorisierung

In diesem Abschnitt sind die Fehlermeldungen beschrieben, die bei der Autorisierung angezeigt werden können.

5.2.1.1 Das eingegebene Kennwort ist ungültig. Bitte neu eingeben und beachten Sie auch Groß-/Kleinschreibung

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie im Kennwortdialog ein ungültiges Kennwort eingegeben und auf „OK“ geklickt haben.

5.2.1.2 Das neue Kennwort ist ungültig oder stimmt nicht überein. Ein Kennwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie bei der Änderung des Kennwortes entweder ein ungültiges neues Kennwort eingegeben haben (kürzer als sechs Zeichen oder länger als 32 Zeichen), oder die Bestätigung des neuen Kennwortes nicht mit dem neuen Kennwort übereinstimmt.

5.2.2 Fehler beim Ändern der Einstellungen „Audiowiedergabe“

In diesem Abschnitt sind die Fehlermeldungen beschrieben, die beim Ändern der Einstellungen „Audiowiedergabe“ angezeigt werden können.

5.2.2.1 Es ist ein Fehler beim Lesen der Soundkarteneinstellungen aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Lesen der aktuellen Soundkarteneinstellungen ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.2.2 Es ist ein Fehler beim Speichern der neuen Soundkarteneinstellungen aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Speichern der neuen Soundkarteneinstellungen ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.2.3 Es ist ein Fehler beim Prüfen der Soundkarteneinstellungen aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Prüfen der Soundkarteneinstellungen ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.2.4 Die Soundkarteneinstellungen sind ungültig, bitte überprüfen Sie die Einstellungen unter

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die aktuellen Soundkarteneinstellungen ungültig sind. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen.

5.2.2.5 Es konnte keine kompatible Soundkarte im System gefunden werden

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn in Ihrem Computer keine kompatible Soundkarte gefunden werden konnte. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.2.6 Es wurde ein ungültiger Wert für die Abschwächung in den gespeicherten Werten entdeckt. Der Wert wurde gelöscht und auf 0 dB gesetzt.

Warnung, die angezeigt wird, wenn bei der Auswahl eines Treibers im Soundkarten-Einstellungsdialogs eine ungültige Abschwächung für diesen Treiber festgestellt und diese auf 0 dB korrigiert wurde.

5.2.2.7 Bei der Anzeige des Einstellungsdialogs der Soundkarte ist ein Fehler aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Einstellungsdialog des Soundkarten-Herstellers nicht angezeigt werden konnte. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.2.8 Für den ausgewählten Treiber konnte kein Windows-Mixer gefunden werden. Bitte wählen Sie die zu kontrollierenden Mixer im folgenden Dialog.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn für den ausgewählten Soundtreiber die zugehörigen Windows-Mixer nicht automatisch gefunden werden konnten. Wählen Sie in diesem Fall die zu kontrollierenden Windows-Mixer im entsprechenden Mixer-Dialog.

5.2.2.9 Bei der Anzeige des Mixerdialoges ist ein Fehler aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, falls bei der Anzeige des Mixer-Dialogs ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.3 Fehler beim Ändern der Einstellungen „Audiometer“

In diesem Abschnitt sind alle Fehlermeldungen aufgelistet, die beim Ändern der Einstellungen „Audiometer“ angezeigt werden können.

5.2.3.1 Es ist ein Fehler beim Speicherzugriff aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Anzeigen des Einstellungsdialogs ein Speicherfehler auftritt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.3.2 Es ist kein gültiger CD-Eingang ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen CD-Eingang ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.3 Es ist kein gültiger Signaleingang ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen Signaleingang ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“. Wenn dieser Fehler auftritt, obwohl der Signaleingang nicht einstellbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.3.4 Es ist kein gültiger Signal-Eingang links ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen Signal-Eingang links ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.5 Es ist kein gültiger Signal-Eingang rechts ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen Signal-Eingang rechts ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.6 Es ist keine gültige Audioquelle links ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keine gültige Audioquelle für den linken Kanal ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.7 Es ist keine gültige Audioquelle rechts ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keine gültige Audioquelle für den rechten Kanal ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.8 Mindestens eine Audioquelle fehlt (fehlende Einstellungen der Audiowiedergabe).

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn für einen Kanal keine Audioquelle vorhanden ist. Korrigieren Sie die entsprechende Einstellung „Audiowiedergabe“.

5.2.3.9 Die Audioquellen links und rechts dürfen nicht identisch sein.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie für den linken und den rechten Kanal dieselbe Audioquelle ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.10 Die Audioquellen links und rechts dürfen nicht identisch sein (falsche Einstellungen der Audiowiedergabe).

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn für den linken und den rechten Kanal dieselbe Audioquelle verwendet wird. Korrigieren Sie die entsprechende Einstellung „Audiowiedergabe“.

5.2.3.11 Es ist kein gültiger Kopfhörer ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen Kopfhörer ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.12 Die Einstellungen für die Freifeldausgänge sind unvollständig.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie mindestens einen Freifeld-Ausgang nicht gültig ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.13 Es ist keine gültige Kombination von Freifeld-Ausgängen gewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie eine ungültige Kombination von Freifeld-Ausgängen ausgewählt haben, z.B. den gleichen Lautsprecher für verschiedene Ausgänge, und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.14 Es ist kein gültiger voreingestellter Pegel ausgewählt.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie keinen gültigen, voreingestellten Pegel ausgewählt haben und auf „OK“ geklickt haben. Korrigieren Sie die Einstellung und klicken Sie erneut „OK“.

5.2.3.15 Das Skript für die Einstellungen konnte nicht geschrieben werden.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Speichern der neuen Einstellungen ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.3.16 Die Datei konnte nicht geschrieben werden.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Schreiben einer Datei ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4 Fehler beim Ändern der Einstellungen „Datenbank“

5.2.4.1 Es ist ein interner Fehler aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Ändern der Einstellungen ein interner Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.2 Es ist ein Fehler beim Speicherzugriff aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Ändern der Einstellungen ein Speicherfehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.3 Das Skript für die Einstellungen konnte nicht geschrieben werden.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Speichern der neuen Einstellungen ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.4 Es ist ein Fehler beim Schreiben aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Schreiben einer Exportdatei ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.5 Das Schlüsselfeld des Datensatzes ist leer.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Zugriff auf eine Tabelle der Primärschlüssel leer ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.6 Die Konfiguration der Tabelle ist unvollständig.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn bei der Konfiguration einer Datenbanktabelle bzw. des Servers die Angabe für den Server nicht komplett ist.

5.2.4.7 Die Konfiguration der Tabelle ist ungültig.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn bei der Konfiguration einer Datenbanktabelle bzw. des Servers die Angabe für den Server ist.

5.2.4.8 Es ist ein Fehler beim Transferieren der Datensätze aufgetreten. Die Datensätze sollten wie vor dem Vorgang verfügbar sein. Sollte dies nicht der Fall sein, verständigen Sie bitte Ihren Kundendienst.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Transferieren der Datensätze ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.9 Ungültiger Tabellen-Name.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Transferieren der Datensätze ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.10 Ungültige Datenbank für Tabelle.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Transferieren der Datensätze ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.11 Es ist ein Fehler bei der Aufbereitung der Daten für die Darstellung aufgetreten.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn beim Synchronisieren von Datensätzen zweier Datenbanken ein interner Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.12 Es ist mindestens ein Fehler beim Synchronisieren der Netzwerk-Datenbank mit der lokalen Datenbank aufgetreten.

Es ist mindestens ein Fehler beim Synchronisieren der Netzwerk-Datenbank mit der lokalen Datenbank aufgetreten und die Synchronisation wurde abgebrochen.

Eine dieser Fehlermeldungen wird angezeigt, wenn beim Synchronisieren von Datensätzen zweier Datenbanken ein Fehler aufgetreten ist. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

5.2.4.13 Die Synchronisation kann nicht gestartet werden, da zur Zeit schon ein anderer Synchronisationsprozess läuft.

Die Synchronisation kann nicht gestartet werden, da der lokale und der Netzwerk-Datenbankpfad auf die gleiche Datenbank verweisen.

Die Synchronisation kann nicht gestartet werden, da die Sperrdatei für die lokale Datenbank nicht erstellt werden konnte.

Die Synchronisation kann nicht gestartet werden, da die Sperrdatei für die Netzwerk-Datenbank nicht erstellt werden konnte.

Eine dieser Fehlermeldungen wird angezeigt, wenn beim Synchronisieren von Datensätzen zweier Datenbanken der entsprechende Fehler aufgetreten ist. Beheben Sie die Ursache und führen Sie die Synchronisation erneut durch.