

Allgemeine Informationen zu Ihrer Aquamatic:

Um eine Verkeimung des Gerätes zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Bei der Geräteinstallation sollte vor dem Anschließen die Zuleitung durchgespült werden.
- Es wird empfohlen alle Anschlüsse vor dem anschließen zu desinfizieren.
- Bei allen Anschlussarbeiten sind Handschuhe zu tragen. Ein bloßes Berühren der Anschlüsse mit der Hand kann schon zu einer Verkeimung führen.
- Auch ein Filterwechsel sollte mit Handschuhen durchgeführt werden, um eine Verkeimung zu vermeiden.
- Der Dekontaminationsmodus des Gerätes sollte mehrmals täglich ausgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Bildung eines Biofilms bzw. eine Verkeimung zu vermeiden und nur so lange wirksam, wie sich noch kein Biofilm gebildet hat.
- Im Dekontaminationsmodus werden auch der Schlauch und der Handgriff mit 70°C heißem Wasser durchgespült. Diese Teile können auch sterilisiert werden. Allerdings muss in diesem Fall gewährleistet sein, dass der Schlauch und der Handgriff sauber sind. Nur in diesem Fall kann eine Sterilisierung erfolgreich sein.
- Der Düsenansatz muss grundsätzlich separat desinfiziert werden.
- Optional ist für die Aquamatic ein zusätzlicher Keimfilter (Germlyser ENT) erhältlich, der vor die Handgriffspitze geschraubt wird. Dieser ist grundsätzlich für eine Betriebszeit von 4 Wochen ausgelegt und muss dann ausgetauscht werden. Ist jedoch eine erhöhte Keimzahl vorhanden sein, sollte dieser öfter gewechselt werden.

Sollte Ihr Gerät verkalkt sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drehen Sie die Wasserzuführung ab.
- Schrauben Sie den Wasserfilter auf und entnehmen Sie die Filterpatrone.
- Füllen Sie nun Entkalker (handelsüblich, z.B. Sidol) in das Filterglas.
- Schrauben Sie das Filterglas mit Entkalker auf.
- Lassen Sie diese Spülung durch den Wasserkaloristaten laufen.
- Wiederholen Sie den Vorgang.
- Anschließend lassen Sie dreimal klares Wasser durch den Kaloristaten laufen.
Setzen Sie die Filterpatrone wieder ein.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei diesen Arbeiten Handschuhe tragen.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!

GN Otometrics GmbH
Abteilung Service

An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster

Phone: +49 (0) 251- 203 983-9922
Fax: +49 (0) 251- 203 983-996
E-mail: service-de@otometrics.com
Web: www.gnotometrics.de